

# MASK One

MASCARILLA HIGIÉNICA MONOCAPA REUTILIZABLE  
EFICACIA TESTADA HASTA 50 LAVADOS



Transpirable,  
0% hidrófila



Suave



Certificada



Bactericida y  
fungicida

## Mascarilla certificada:

UNE0065:2020@EN146883 (5 lavados >95% BFE)

CWA17553:2020 (50 lavados >82% BFE)

ONE es una mascarilla higiénica reutilizable y reciclable con un alto estándar de calidad. El tejido es suave al tacto y consigue la filtración bidireccional con una sola capa. Confort y eficiencia garantizados.

**2r System**  
[www.2rsystem.es](http://www.2rsystem.es)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tejido: Elasek 150  
Composición: Olefine - Antistatic  
Peso: 150 gr/m<sup>2</sup>  
Recomendamos un máximo de 50 lavados.

- **Barrera bacteriana:**  
BFE **93.38% ± 4.81% (1)**  
BFE **82% ± 3% (2)**
- **Respirabilidad:** Presión diferencial  
**32.6 ± 1 Pa/cm<sup>2</sup> (1)**  
**21.6 ± 1 Pa/cm<sup>2</sup> (2)**
- Propiedades **fungicidas y bactericidas.**
- **Antiestático:** tejido disipador de cargas electroestáticas (EN 1149-3).
- Antiacido (EN 13034).
- **100% reciclable:** todos sus componentes se reciclan.



**(1) UNE0065:2020@EN14683** - después de 5 lavados.

**(2) CWA17553:2020** - después de 50 lavados.

## PRECAUCIONES

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

ADVERTENCIA: este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017 / 745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016 / 425.



## LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA

1. Ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de 60°C. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
2. Una vez lavada se recomienda que la mascarilla se seque dentro de las 2h posteriores al lavado.
3. Evitar ambientes en los que la mascarilla se pueda contaminar tanto en el secado como en el almacenaje posterior.
4. Después de cada ciclo de lavado inspeccionar visualmente la mascarilla. Si se detecta algún daño (menor ajuste, deformación, desgaste, etc) se debe desechar la mascarilla.

### Recomendamos el lavado manual y el secado al aire.



Temperatura lavado 60°C



Permite uso de lejía



Secado con secadora: recomendada 40°C, duración máxima de 5 minutos a baja temperatura.



No planchar

## USO DE LA MASCARILLA

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

NOTA: Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual. Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica.

## CONSEJOS DE USO

- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h.
- La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.
- No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente, se debe evitar el contacto con cualquier superficie.
- Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después de cada uso.

## COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
3. Sujetar la mascarilla desde el exterior y sujetar los elásticos a ambos lados de las orejas.
4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
5. Ajustar a la nariz.
6. Una vez ajustada no tocar con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla debe previamente lavarse las manos.



## RETIRADA DE LA MASCARILLA

7. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica
8. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal
9. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica

## ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA


Para reducir los riesgos del uso de esta mascarilla se debe advertir que una vez sobrepasados 50 lavados se debe desechar.

## PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR LA MASCARILLA

10. Lavar una última vez la mascarilla antes de desecharla y ponerla dentro de una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior.
11. Desechar la mascarilla en el contenedor amarillo.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

## TALLAJE

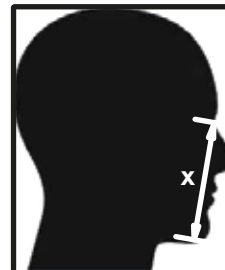

Según medida X comprendida entre la parte inferior del mentón y el punto más profundo de la depresión de la raíz nasal.

**S** (pequeña): 105-112 mm

**M** (mediana): 113-125 mm

**L** (grande): 126-135 mm

## SOSTENIBILIDAD

El objetivo de 2r System es facilitar la circulación de personas de forma segura con un enfoque sostenible. Para conseguirlo nuestras mascarillas siguen los **valores de sostenibilidad social, medioambiental y económica**, así como la previsión del **ciclo cerrado** de las mascarillas. Obtén más información en nuestra web: [www.2rsystem.es](http://www.2rsystem.es)



Reduce el consumo, reutilizable 50 veces, reciclable 100%.

